

## Wichtige allgemeine Hinweise für Ein- und Rücksendungen

- > Senden Sie nur **gründlich gereinigte** Geräte und Koffer ein. Nicht gereinigte Einsendungen werden kostenpflichtig gereinigt oder zur Reinigung zurück gesendet.
- > Entnehmen Sie vor dem Verpacken unbedingt den Filterbeutel und reinigen Sie das Filterbeutelfach. **Bitte legen Sie keinen neuen Filterbeutel ein!**
- > Entfernen Sie die Handstückshülse und reinigen Sie das Handstück gründlich.
- > Desinfizieren Sie die Oberfläche des Gerätes mit geeigneten Desinfektionsmitteln (z.B. RUCK® Flächendesinfektionstücher alkoholfrei im Softpack Art.-Nr. 2967002).
- > Bitte senden Sie technische Geräte immer im Originalkarton unter Verwendung der Polstereinlagen ein, siehe Verpackungsanleitung.
- > Legen Sie das **Auftragsformular ausgefüllt** und unterschrieben der Einsendung bei. Die jeweiligen Formulare können auch im Downloadbereich unter **hellmut-ruck.de** heruntergeladen werden.

## Verpackungsanleitung des **PODOLOGNOVA® + PODOLOGNOVA<sup>3s</sup>**

Wenn Sie uns Ihren **PODOLOG NOVA 3** oder **3s** zur Wartung, Reparatur, oder Ihr Leihgerät zurückschicken, achten Sie bitte darauf, dass der Filterbeutel entfernt und das Gerät gereinigt und desinfiziert ist, gemäß Gebrauchsanweisung Art.-Nr. 8011011 oder Art.-Nr. 8011041. Außerdem nur nach dieser Verpackungsanleitung vorgehen. Vielen Dank!



- 3** Für die Verpackung des Handstücks kann sowohl der Originalrahmen als auch der Styropor-Block verwendet werden.



- 1** Fußpflegegerät **PODOLOG NOVA 3/3s** reinigen, desinfizieren und Filterbeutel entfernen.



- 4** Nur mit leichtem Druck hineindrücken.



- 2** Reinigungsaufsatz entfernen, dann die Styropor-Seitenteile links und rechts befestigen.



- 5** In den Karton verpacken.



Bitte darauf achten, dass das Handstück bei **PODOLOG NOVA 3** und **3s** Geräten nicht an der Glasfront liegt – Splittergefahr!

**Bitte beachten Sie unbedingt die Rücksendefrist des zur Verfügung gestellten Leihgerätes.**