

# Hygieneplan



Haut und Hände

Womit	Wie
29655 RUCK Hautwaschlotion	Hände unter fließendem Wasser gründlich mit Seife einreiben und abspülen. Mit Einweghandtüchern abtrocknen.
2965301 RUCK Haut- und Händereinigungstücher antimikrobiell	Haut mit Tüchern abwischen.



Haut und Hände

Womit	Wie
2969601 RUCK Hautschutzbalsam 29697 RUCK Hautpfegelotion	Ausreichende Menge einmassieren.



Haut und Hände

Wundversorgung

Womit	Wie
29650 RUCK Haut- und Händedesinfektion* 29651 RUCK Haut- und Händedesinfektionsgel* 29652 RUCK Haut- und Händedesinfektion viruzid*	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel aus dem Spender entnehmen und Hände vollständig benetzen. Fingerzwischenräume und Nagelfalz nicht vergessen. Hände vollständig trocknen lassen.
29044 schülke octenisept Wund-Desinfektion Spray	Aufsprühen und gemäß Anleitung einwirken lassen.



Rotierende Instrumente (Fräser)  
Allgemeine Instrumente  
(Zangen, weitere Hilfsmittel)

Womit	Wie
29686 RUCK Instrumentendesinfektion Konzentrat* 29409 RUCK Instrumentendesinfektion Plus*	Instrument in eine vorbereitete Lösung einlegen, anschließend gut abspülen und trocknen. Ein noch besseres Reinigungsergebnis wird durch den Einsatz der Ultraschallaufbereitung erzielt. Ggf. einschweißen und sterilisieren.
29687 RUCK Instrumentendesinfektion Fertiglösung*	Instrument in die gebrauchsfertige Lösung einlegen, anschließend gut abspülen und trocknen.
Maschinelle Aufbereitung (RGD) + 2944601 RUCK Instrumenten-Reinigungskonzentrat + 2630001 HYDRIM Thermodesinfektor C61 + 2630501 HYDRIM Reinigungslösung	Bedienungsanleitung beachten.



Fußbecken  
Handstück Motor  
Arbeitsfläche  
Lupenlampe  
Fußbedienung  
Behandlungsliegen  
Behandlerstuhl

Fußboden

Womit	Wie
29669 RUCK Schaumdesinfektion* 29676 RUCK Flächendesinfektionstücher Softpack* 29671 RUCK Maxi-Flächendesinfektionstücher* 29672 RUCK Premium-Flächendesinfektionstücher* 2967301 RUCK Maxi-Vliesstofftücher 29665 RUCK Flächendesinfektion Konzentrat*	Flächen ausreichend benetzen, antrocknen lassen. In regelmäßigen Abständen die desinfizierten Flächen reinigen.
29665 RUCK Flächendesinfektion Konzentrat* 29676 RUCK Flächendesinfektionstücher Softpack*	Fußboden feucht wischen, antrocknen lassen.





Fußtücher  
Arbeitskleidung

Womit	Wie
2946001 RUCK Desinfektionswaschmittel	In der Waschmaschine bei 40°C oder 60°C (je nach Produkt) waschen.



Spitze und scharfe Gegenstände

Einmaltücher, Tupfer und sonstige Abfälle

Womit	Wie
2909701 Klängen-Aufnahmebox 	Klingen entfernen, im Behälter auffangen und sammeln. Verschlossenen Behälter bei Bedarf über den Hausmüll entsorgen.
2910101 Abfallbehälter 	In verschließbarem, ohne Handkontakt zu öffnenden Müllbehälter sammeln und täglich über den Hausmüll entsorgen.

\*VAH gelistet



# Hygieneplan



Haut und Hände

Womit (Produktname eintragen)	Wann		Wie	Wer
	Zum Arbeitsbeginn und am Arbeitsende Bei sichtbaren Verschmutzungen			



Haut und Hände

Womit (Produktname eintragen)	Wann		Wie	Wer
	Hautschutzcreme vor der ersten Behandlung Hautpflegecreme nach der letzten Behandlung und bei Bedarf			



Händedesinfektion

Womit (Produktname eintragen)	Wann	Konzentration / Einwirkzeit	Wie	Wer
	Vor und nach jeder Behandlung, nach dem Aus- ziehen der Handschuhe, nach dem Toilettenbesuch, nach dem Naseputzen, nach der Schuhinspektion			

Hautdesinfektion

	Vor dem beabsichtigten Durchdringen der Haut Bei Gefahr von Hautverletzungen Bei infektiösen Hauterkrankungen			
--	---	--	--	--

Wundversorgung

	Nach Verletzungen			
--	-------------------	--	--	--



Rotierende Instrumente (Fräser)

Womit (Produktname eintragen)	Wann	Konzentration / Einwirkzeit	Wie	Wer
	Unmittelbar nach jeder Behandlung			

Allgemeine Instrumente  
(Zangen, weitere Hilfsmittel)

	Unmittelbar nach jeder Behandlung			
--	--------------------------------------	--	--	--

Rotierende Instrumente (Fräser)  
Allgemeine Instrumente  
(Zangen, weitere Hilfsmittel)

	Unmittelbar nach jeder Behandlung			
--	--------------------------------------	--	--	--



Fußbecken, Armlehnen, Fußstützen,  
Sitzfläche Behandlerstuhl, Arbeitsfläche,  
Handstück Motor, Lupenlampe

Womit (Produktname eintragen)	Wann	Konzentration / Einwirkzeit	Wie	Wer
	Nach jeder Behandlung			

Fußbedienung  
Sitzfläche Behandlungsliegen  
Stuhlbeine Behandlerstuhl

	Am Arbeitsende oder bei Kontamination			
--	--	--	--	--

Behandlungsliege komplett  
Behandlerschrank komplett  
Motor und Motorfach

	Am Ende der Woche oder bei Kontamination			
--	---	--	--	--

Fußboden

	Täglich am Arbeitsende			
--	------------------------	--	--	--



Fußtücher

Womit (Produktname eintragen)	Wann		Wie	Wer
	Nach Gebrauch			

Arbeitskleidung

	Täglich			
--	---------	--	--	--



Spitze und scharfe Gegenstände

Womit (Produktname eintragen)	Wann		Wie	Wer
	Sofort nach Benutzung			

Einmaltücher, Tupfer und  
sonstige Abfälle

	Sofort nach Benutzung			
--	-----------------------	--	--	--

\*DGHM-/VAH gelistet



HELLMUT RUCK GmbH  
Daimlerstraße 23  
DE-75305 Neuenbürg  
hellmut-ruck.de



4 255621 511367

Datum

Unterschrift / Praxisstempel