

SPA-Behandlungsliege SONORA

Gebrauchsanweisung



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir leben in einer bewegten und gerade deshalb sehr stressreichen Welt. Kein Wunder, dass es einen erhöhten Anspruch auf harmoniefördernde Rückzugsmöglichkeiten gibt. Ruhe und Ausgeglichenheit - dies ist ein natürliches Bestreben in unserer schnelllebigen Zeit. Es gibt einen starken Trend von der rein plakativen Kosmetikbehandlung hin zum ganzheitlichen Wohlfühlerlebnis. Ihr Kunde darf daher Gast in einer beruhigenden Atmosphäre werden, die Sie für ihn gestalten - die SPA-Behandlungsliege soll Ihnen dabei als ideale Basis dienen. Unter Berücksichtigung einer sinnvollen ergonomischen Arbeitsweise kombiniert mit viel Liebe zum Detail in der Gestaltung, ist ein komplett neues Produkt entstanden. Vor Ihnen steht nun die Synthese aus innovativen Funktionen, hoher Qualität und zeitgemäßem Design.

Unsere Behandlungsliegen werden in Deutschland gefertigt und unterliegen einer permanenten Qualitätskontrolle. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein oder Fragen haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Serviceabteilung.

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch hier gerne zur Verfügung.

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns hiermit herzlich, und wünschen Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit viel Freude mit Ihrer neuen SPA-Behandlungsliege!

Ihre HELLMUT RUCK GmbH

P.S. Der Name SONORA bedeutet übrigens die „Klangvolle“. Ergänzen Sie doch Ihre Wohlfühlwelt durch die beruhigenden Klänge der RUCK CD „Sound of Wellness“ Vol. 1 - ein perfekter Rahmen für das vollendete Wellnesserlebnis.




HELLMUT RUCK GmbH | DE - 75305 Neuenbürg
hellmut-ruck.de

Copyright


© 2023 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, bearbeitet, vervielfältigt, noch übersetzt werden.

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht.....	4
Erklärung zu dieser Gebrauchsanweisung	6
Verwendete Symbole	6
Zweckbestimmung	7
Sicherheitshinweise	7
Lieferumfang	11
Transport Verpackung Auspacken Lagerung.....	13
Aufbauen der Behandlungsliege	14
Funktionen des Funk-Handschafters	20
Bedienung der LED-Ambientebeleuchtung	22
Polster	23
Kopfstütze	23
Armauflage.....	23
Polsterheizung	24
Reinigung, Desinfektion und Pflege	25
Technische Daten	27
Wartung	27
Entsorgung	28
Gewährleistung	28
FAQ	29
Zubehör/Ersatzteile	29

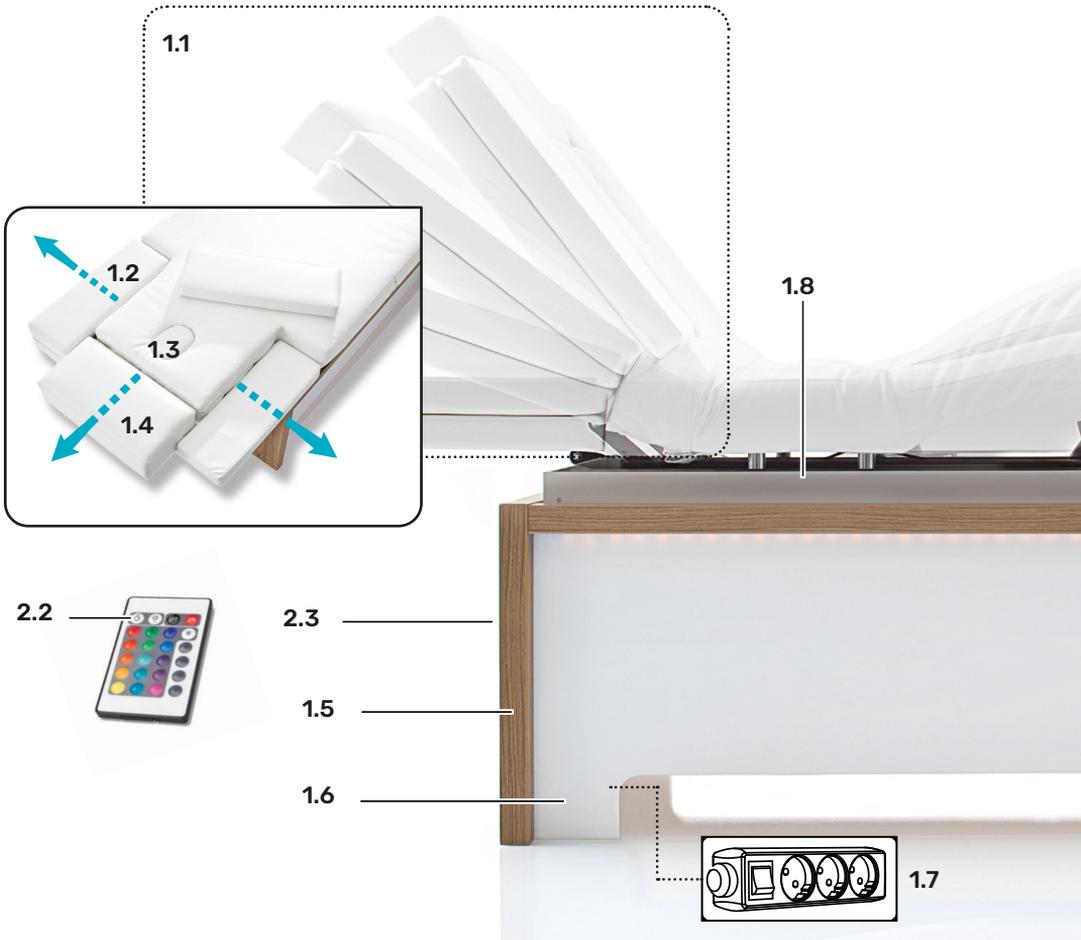

- | | | | |
|------------|-------------------------------------|------------|--|
| 1.1 | Rückenteilpolster | 1.6 | Acrylverkleidung |
| 1.2 | Ausziehbare, abnehmbare Armauflagen | 1.7 | 3-fach-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter |
| 1.3 | Optionaler Nasenschlitz | 1.8 | Heizung Ein- und Ausschalttaste (2-stufig) |
| 1.4 | Ausziehbares Kopfteilpolster | | |
| 1.5 | Außenrahmen (Dekor) | | |

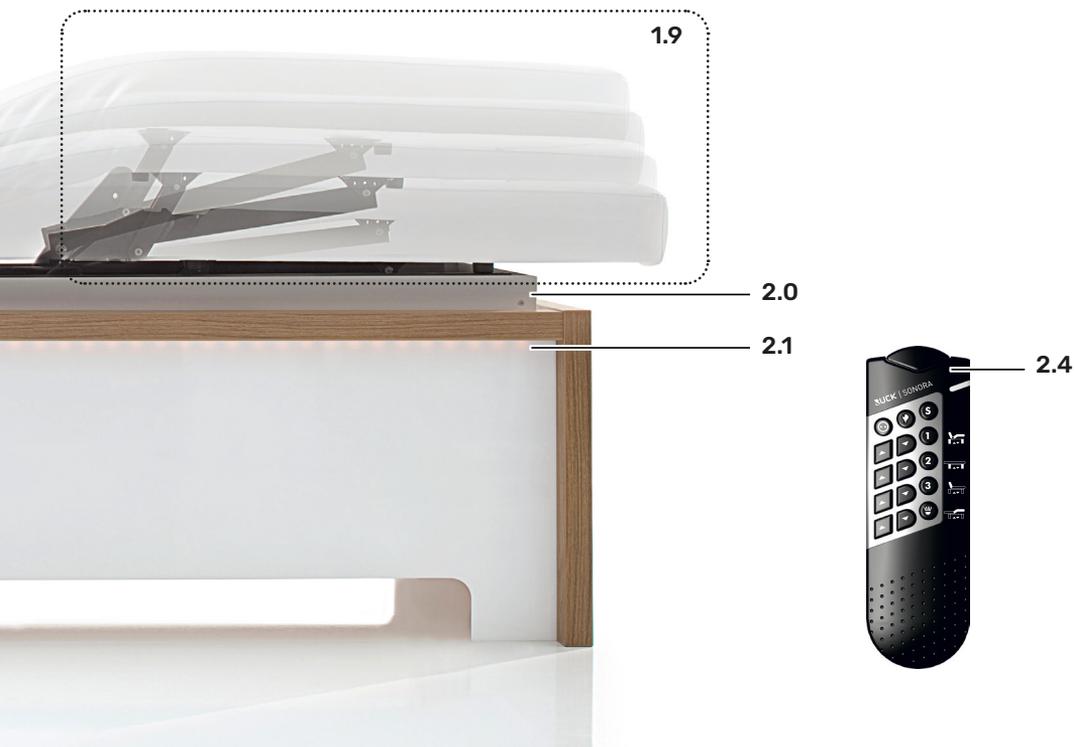

1.9 Fußteilpolster

2.0 Innenrahmen (weiß)

2.1 LED-Lichtleiste

2.2 LED-Handschalter

2.3 LED-Empfänger

2.4 Handschalter (Funk)

Erklärung zu dieser Gebrauchsanweisung

Die HELLMUT RUCK GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung vor. Die HELLMUT RUCK GmbH hat große Sorgfalt darauf verwendet, diese Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu halten. Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns bitte. Jedoch besteht seitens der HELLMUT RUCK GmbH keinerlei Haftung für Fehler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resultierende Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der Verwendung derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben.

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, soweit nicht durch die HELLMUT RUCK GmbH ausdrücklich genehmigt.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.

Verwendete Symbole



Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder für das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.



Dieses Symbol kennzeichnet nützliche Hinweise. An dieser Stelle werden zusätzliche Informationen zum Produkt und dessen Bedienung gegeben.



Gerät der Schutzklasse II (schutzisoliert)



Entsorgungshinweis beachten



Herstelldatum



CE-Konformitätskennzeichen



Gebrauchsanweisung beachten

Zweckbestimmung

Bei der RUCK SPA-Behandlungsliege handelt es sich um eine multifunktionale SPA-Behandlungsliege, d.h. sie ist für Gesichts-, Dekolleté, Körper-, Epilation und Depilationsbehandlungen geeignet.

Die Behandlungsliege darf nur mit einer Person mit maximal 200 kg belegt werden. Unter keinen Umständen dürfen zwei oder mehr Personen gleichzeitig die Behandlungsliege nutzen.

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß!

Umbauten, Veränderungen, Anbringen von nicht vom Hersteller gelieferten Zusatzausstattungen sind nicht gestattet. Ausnahmen können nur vom Hersteller schriftlich genehmigt werden.

Bei Reparaturen ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten aller Anweisungen, Sicherheitshinweisen und Bestimmungen dieser Gebrauchsanweisung.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt jegliche Haftung und Garantie!

Sicherheitshinweise



Explosionsgefahr in ungeeigneten Einsatzorten!

Die RUCK SPA-Behandlungsliege darf nur in trockenen und nicht explosionsgefährdeten Räumen betrieben werden. Der Betrieb der RUCK SPA-Behandlungsliege in explosionsgefährdeten Räumen kann zur Auslösung einer Explosion führen.



Zugelassene Bedienpersonen | Pflichten des Betreibers

Zugelassene Bedienpersonen: Personal in Fußpflegepraxen, Kosmetik-Studios und Massagepraxen.

Der Betreiber muss die Bedienpersonen einweisen, die Gebrauchsanweisung zugänglich machen und sich vergewissern (nachweislich), dass diese gelesen und verstanden wurde.



Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.



Gefahren durch elektrische Energie

Gefahr durch elektrische Energie kann entstehen durch: Falsche Reparaturarbeiten an den Elektrokomponenten, Verwendung von Nicht-Originalteilen im Trafobereich, nicht abgezogenem Netzstecker bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, Überfahren, Beschädigung der Netzleitung. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

Bei Nichtgebrauch der Liege unbedingt den Ein-/Ausschalter unter der Liege ausschalten und den Netzstecker ziehen. Keinesfalls darf die Liege elektrisch verstellt werden, solange sich Personen im Bewegungsbereich der Liege aufhalten.

Interferenzen mit anderen elektrischen Geräten können unter Umständen auftreten.



Schutzeinrichtungen

Sicherungen und Verkleidungen sind zum Schutz von Benutzer und Bediener eingebaut. Sie dürfen nicht entfernt, verändert oder umgangen werden.

Erkannte Mängel sofort beseitigen lassen!



Tägliche Funktionsprüfungen

Vor jeder Belegung müssen die nachstehenden Kontrollen durchgeführt werden:

1. Alle elektrisch verstellbaren Teile wie Rücken -, Bein- und Höhenverstellung mittels Handschalter auf Funktionsfähigkeit prüfen.
2. Allgemeine Sichtprüfung

Bei Nichtbeachtung droht Gewährleistungs- und Haftungsausschluss!



Erstfehlersichtung

Stoppt ein Motor trotz „Loslassens“ des Funktionstasters nicht oder sollte die Funktion des Handschalters bei sonstigen (Not)-Fällen ausgeschaltet sein müssen, kann durch Dritte (z.B. Personal) mit dem Ein-/Ausschalter (Sperreinrichtung) unter der Behandlungsliege die komplette Stromzufuhr unterbrochen werden. Diese Sperreinrichtung kann beim bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht durch die behandelte Person betätigt werden. Alternativ kann auch der Netzstecker gezogen werden.



Zugänglichkeit des Netzsteckers

Der Netzstecker dient zur Netztrennung. Die Zugänglichkeit des Netzsteckers zum Trennen vom Stromnetz im Notfall ist stets zu gewährleisten.



Ordnungsgemäßer Zustand der Netzanschlussleitung

Sollten Sie Beschädigungen an der Netzanschlussleitung oder sonstigen Leitungen feststellen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die defekte Leitung durch eine qualifizierte Fachkraft ersetzen.



Stolpergefahr

Nicht über das Netzkabel (Quetschgefahr, elektrische Gefahr) oder das Handschalterkabel fahren bzw. stellen (Quetschgefahr, Funktionsstörung). Netzkabel stolpersicher verlegen. Netzkabel darf nicht gestrafft verlegt werden.



Elektrische Gefahr

Netz- und Fußschalterkabel darf nicht in die beweglichen Teile gelangen, es besteht Quetschgefahr und /oder die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Aufstellplan | Platzbedarf

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Liege so weit von der Wand weggestellt wird, dass die Liegefläche nirgends kollidiert und gut zugänglich ist.



Hinweis

Auch beim kurzfristigen Verlassen der Behandlungsräume ist die Behandlungsliege auszuschalten.



Vor jeder Reparatur oder Wartungsarbeit unbedingt Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Bei Nichtbeachten können schwere Verletzungen entstehen.



Hinweis!

Sichtprüfung

Betreiben Sie die Behandlungsliege nur, wenn sie unbeschädigt ist. Lassen Sie Beschädigungen jeglicher Art (Quetschstellen, Bauteile porös, Bauteile eingerissen usw.) durch eine autorisierte Fachkraft beseitigen.

Tägliche Funktionsprüfung

Alle elektrisch verstellbaren Teile wie Rücken-, Bein- und Höhenverstellung mittels Handschalter auf Funktionsfähigkeit prüfen.



Instandsetzungen und Reparaturen dürfen nur von den vom Hersteller autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.

Bei Nichtbeachten bzw. Nichterfüllung aller aufgeführten Punkte erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch sowohl für Sach- als auch Personenschäden.

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

1 x Handschalter (Funk) | 32250-008




1 x LED-Handschalter | 32250-009




Batteriewechsel

Die Batterien der beiden Handschalter sind in der Regel nach einem Jahr, bzw. bei spürbar abnehmender Sendeleistung zu tauschen.


Befestigungselemente

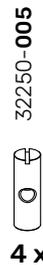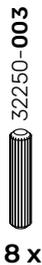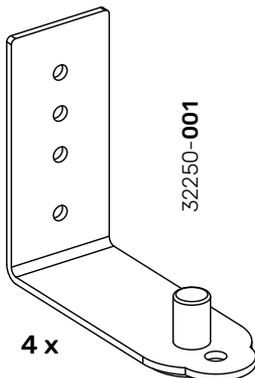


1 x Behandlungsliege (Polster mit Basisgestell) | 32250-010

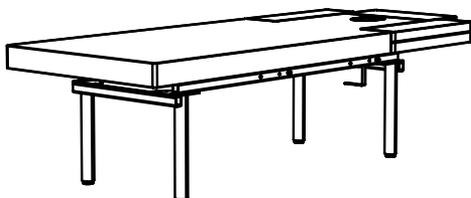


1 x Außenrahmen Dekor | 32250-010A
(mit Elektrikkomponenten)

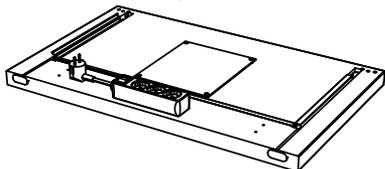


1 x Außenrahmen Dekor | 32250-010B

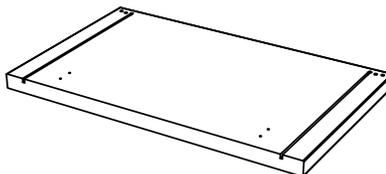


2 x Außenrahmen Dekor - Querstreben | 32250-011

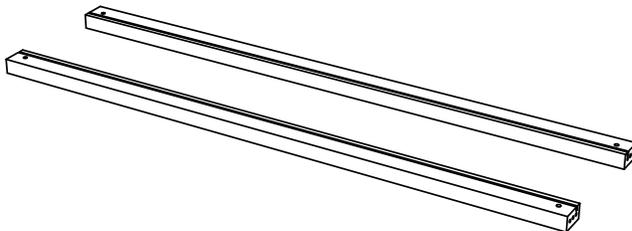


2 x Acrylverkleidung | 32250-012

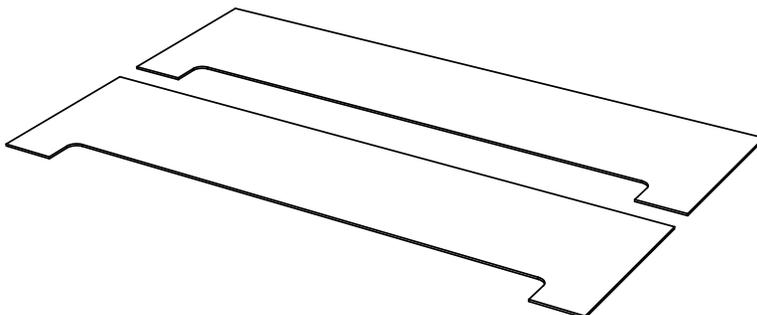

2 x Innenrahmen (weiß) längs | 32250-013

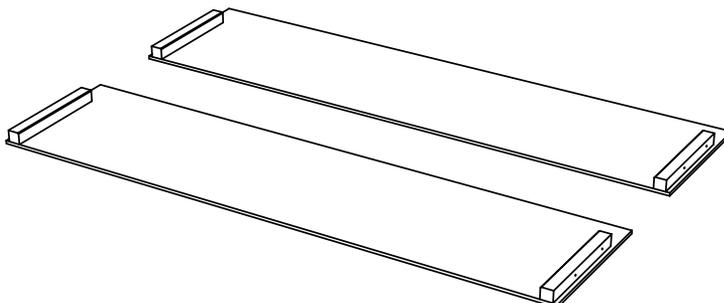

2 x Innenrahmen (weiß) quer | 32250-014

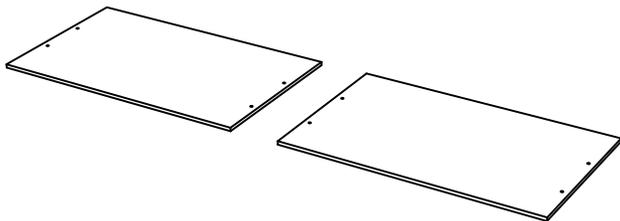

Transport | Verpackung | Auspacken | Lagerung

Anlieferung und Zwischenlagerung der Liege erfolgt im Transportkarton. Die Verpackung schützt das Produkt vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und recyclebar. Umgebungstemperatur -15° bis $+40^{\circ}$, Luftfeuchtigkeit 30-75%, Zulässiger Luftdruck: 700-1060 hPa.

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Nennspannung und Frequenz übereinstimmt. Die RUCK SPA-Behandlungsliege kann mit dem beiliegenden Netzkabel (Kabellänge gerollt 3 m) an jeder Schuko Steckdose angeschlossen werden.

RUCK | **SONORA**
SPA-Behandlungsliege

TECHNISCHE DATEN:
Anschlussdaten: 230V ~ 50 Hz, 550 W
Schutzart: IP 20
Einschaltdauer: 10% (= 2 min. AN / 18 min. AUS)
Max. Ges.belastung: 200 kg

SN: 

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22
e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de


Aufbauen der Behandlungsliege

Zum Aufbau der Holzverkleidung finden Sie unter folgendem Link, bzw. dem rechtsstehenden QR-Code ein Video mit einer detaillierten Anleitung:


www.vimeo.com/hellmutruck/sonora-aufbau




①

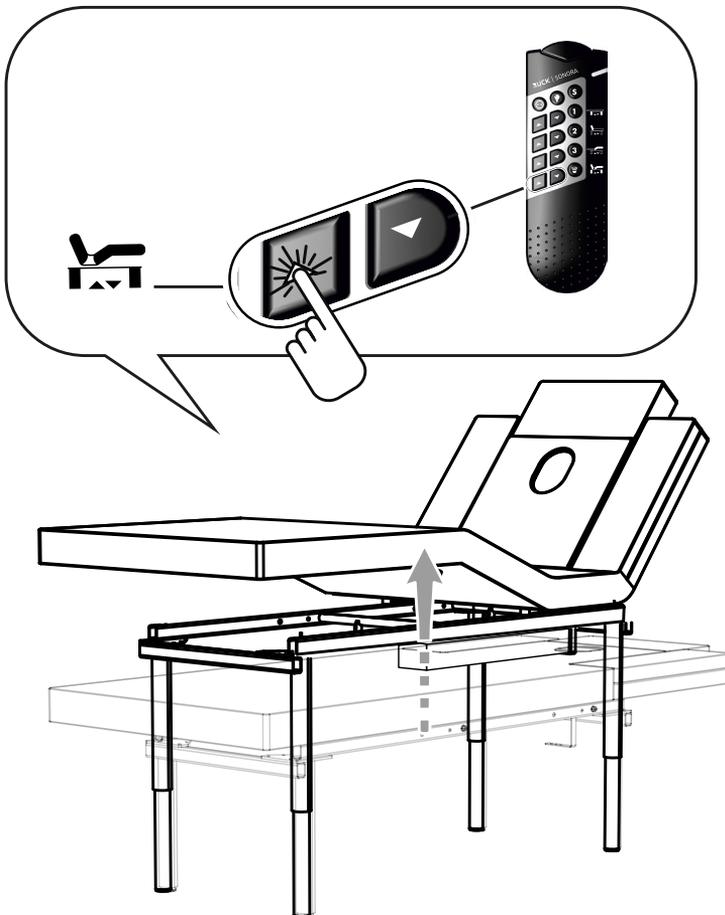


2

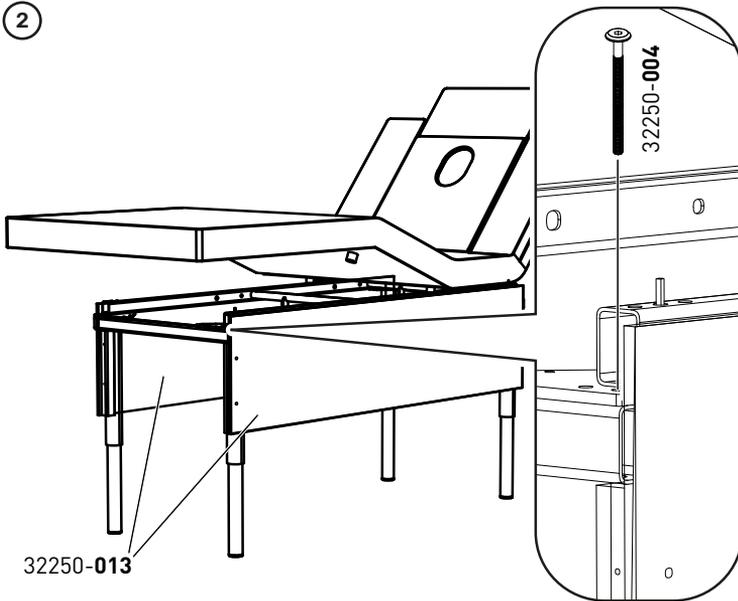


3

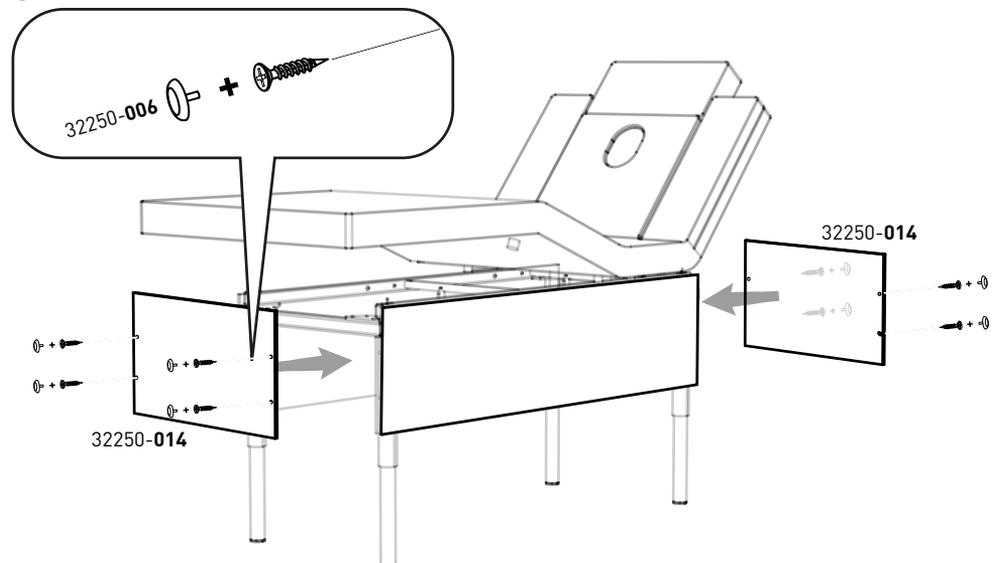


4

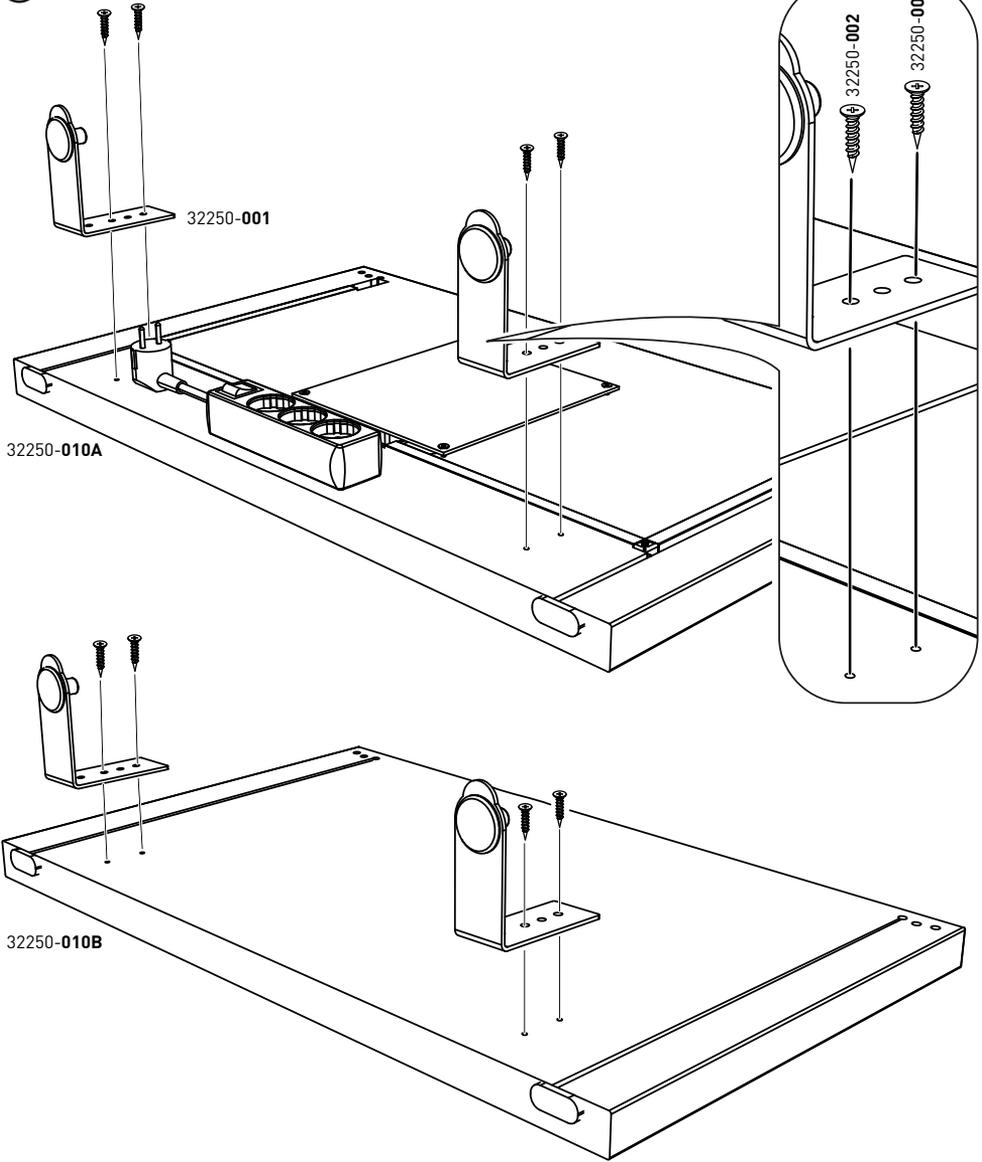


5

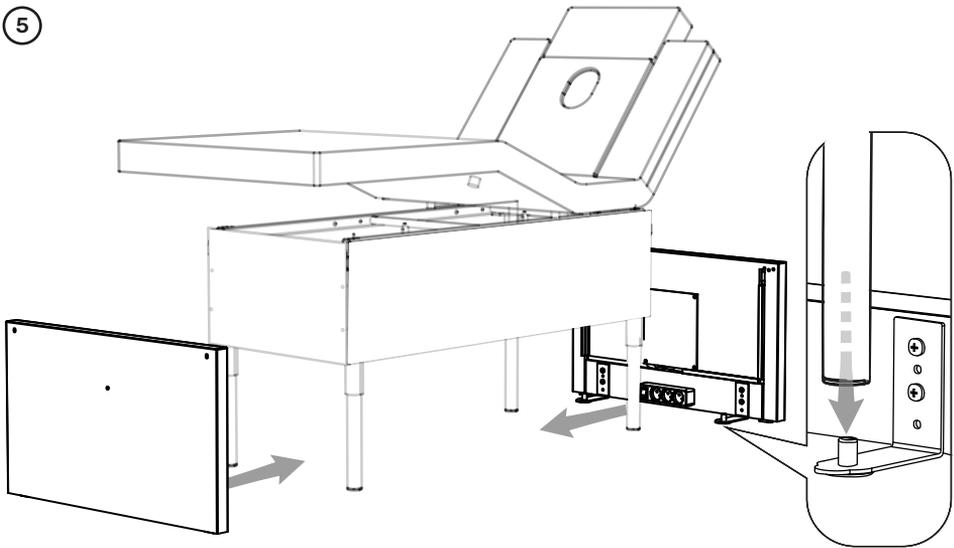


6

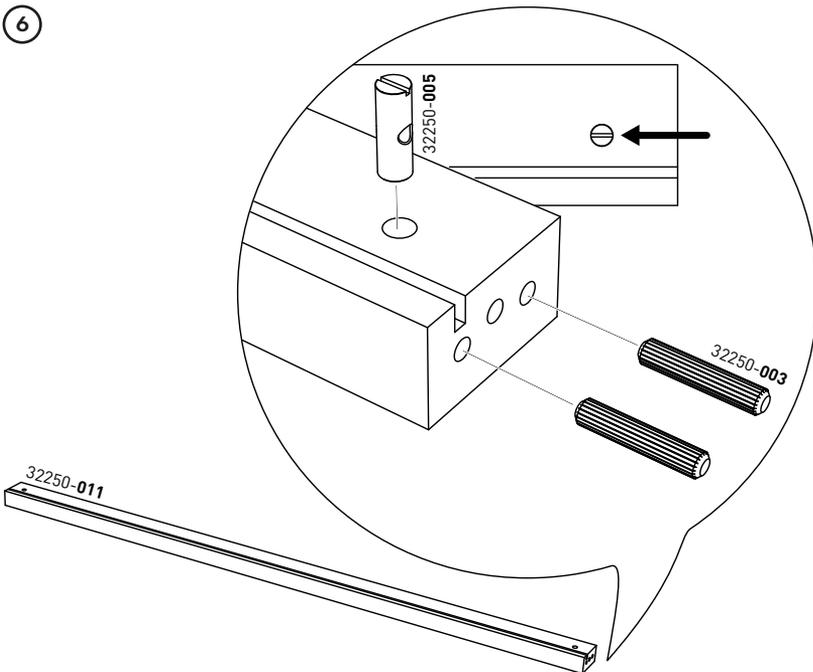


7

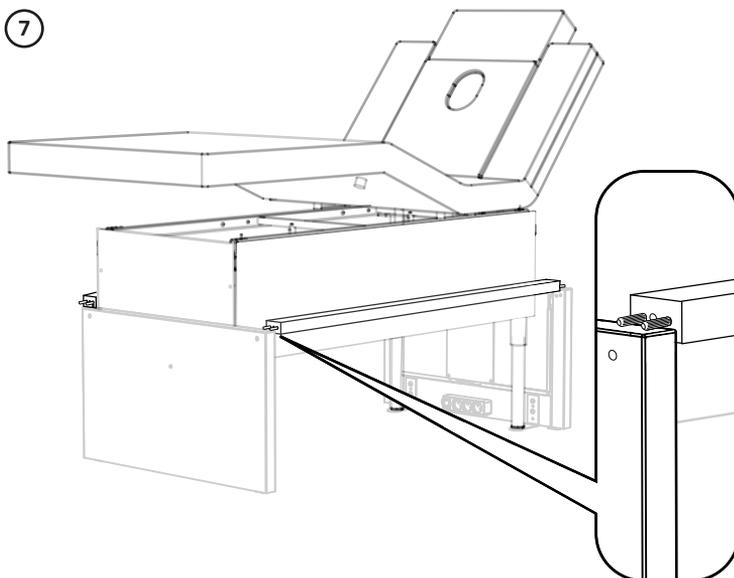


8

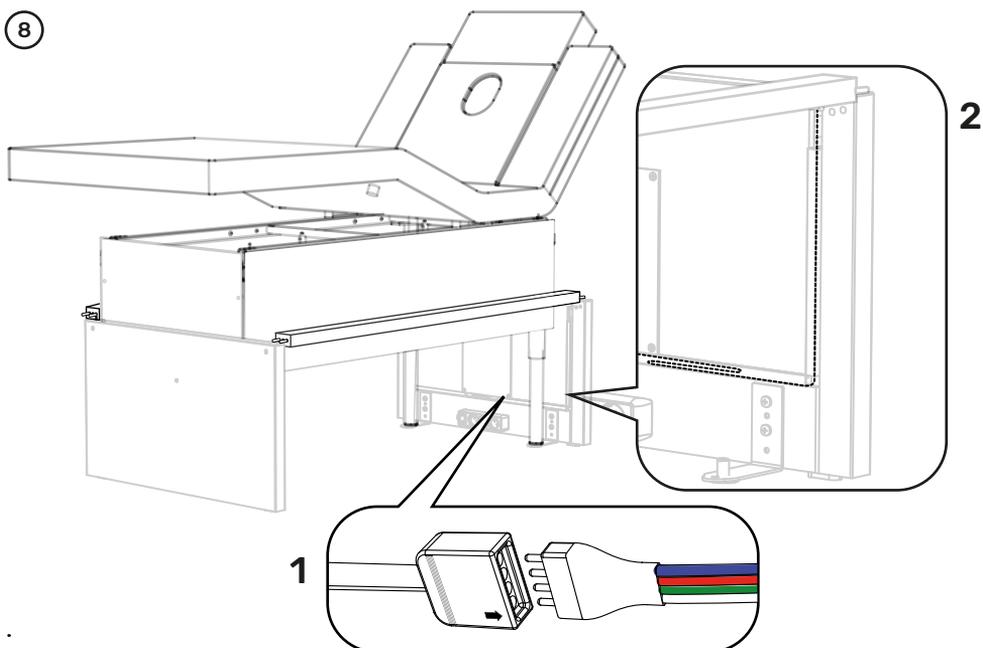


9

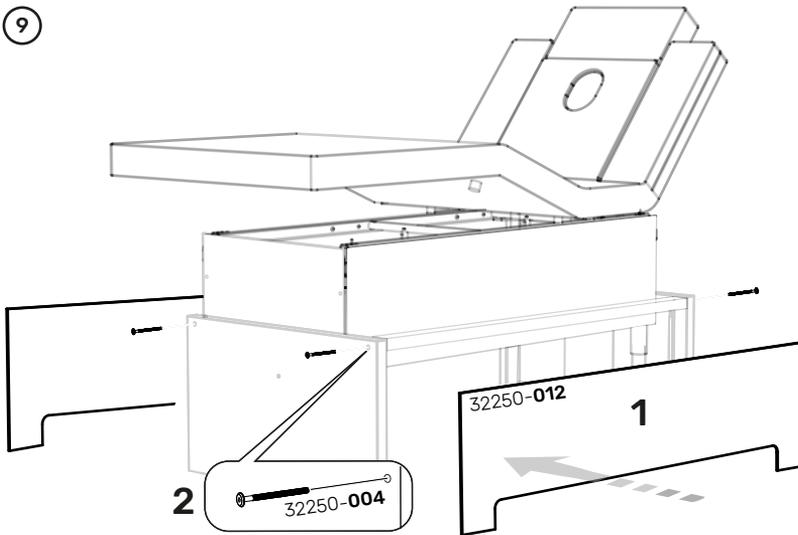

10

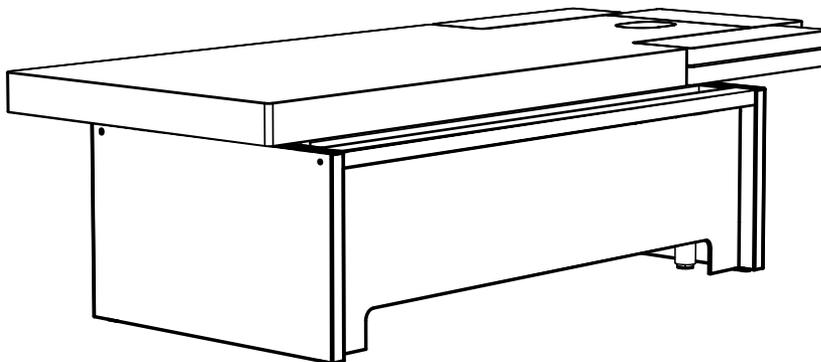


Funktionen des Funk-Handschalters

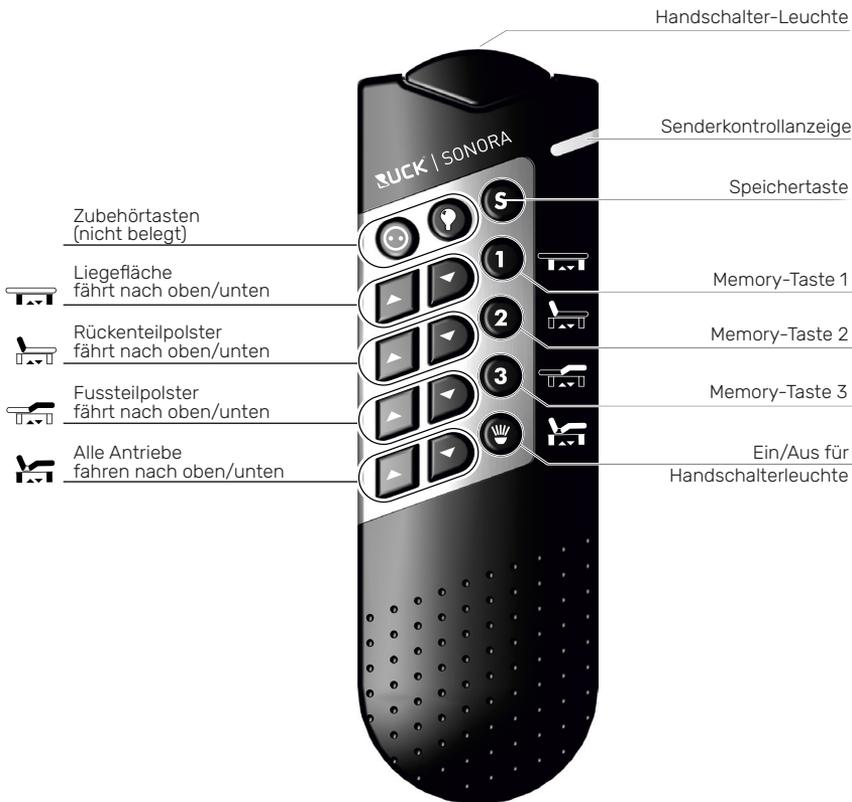

Quetschgefahr

Beim Absenken des Rücken- und Fußteilpolsters nicht unter die Auflagepunkte der Polster fassen!

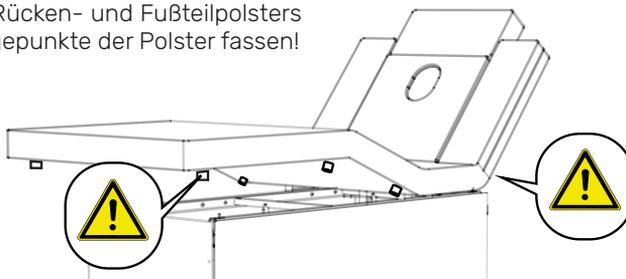



Die Liegefläche nach oben/unten verfahren.
 Drücken Sie die ▲-Taste, um die Liegefläche nach oben zu fahren.
 Drücken Sie die ▼-Taste, um die Liegefläche nach unten zu fahren.



Das Rückenteilpolster nach oben/unten fahren.
 Drücken Sie die ▲-Taste um das Rückenteilpolster nach oben zu verfahren.
 Drücken Sie die ▼-Taste um das Rückenteilpolster nach unten zu verfahren.



Das Fußteilpolster nach oben/unten fahren.
 Drücken Sie die ▲-Taste um das Fußteilpolster nach oben zu verfahren.
 Drücken Sie die ▼-Taste um das Fußteilpolster nach unten zu verfahren.



Alle Antriebsmotoren gleichzeitig nach oben/unten verfahren.
 Drücken Sie die ▲-Taste, um alle Antriebsmotoren gleichzeitig nach oben zu verfahren.
 Drücken Sie die ▼-Taste, um alle Antriebsmotoren gleichzeitig nach unten zu verfahren.

Positionen einprogrammieren


Sie haben die Möglichkeit drei individuelle Liegepositionen nach Ihren Wünschen zu speichern. Fahren Sie dazu die RUCK SPA-Behandlungsliege durch Drücken der Einzel-funktionstasten in die gewünschte Liegeposition. Drücken Sie 3 mal hintereinander die Taste S (Speichertaste) und dann den gewünschten Programmplatz (Memory-Taste 1, 2 oder 3). Die gespeicherte Liegeposition wird durch einen kurzen Signalton bestätigt. Nun ist Ihre individuelle Behandlungsposition gespeichert und kann jederzeit durch Drücken der Memory-Taste abgerufen werden. Die Memory-Tasten können durch Wiederholen des beschriebenen Speichervorgangs neu belegt werden.

Tastensperre aktivieren/deaktivieren

Halten Sie die Taste S für 10 Sekunden gedrückt bis zwei Signaltöne ertönen. Die Tastensperre ist jetzt aktiv. Deaktivieren Sie die Tastensperre indem Sie die Taste S für 10 Sekunden drücken, bis ein Signalton ertönt. Die Tastensperre ist deaktiviert.

Bedienung der LED-Ambientebeleuchtung

Ein echtes Highlight der SPA-Behandlungsliege ist die integrierte RGB-LED Ambientebeleuchtung - ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Entspannung. Die Steuerung erfolgt vollständig über die dazugehörige IR-Fernbedienung.

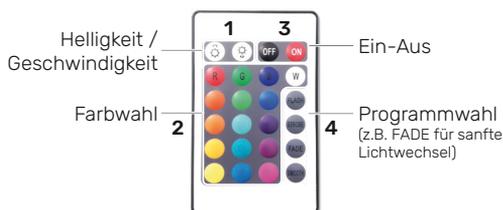

1 Helligkeit oder Geschwindigkeit des Farbwechsels ändern

Die Helligkeit kann in mehreren Stufen geregelt werden. Haben Sie eines der vordefinierten Farbwechselprogramme ausgewählt, so kann hier die Geschwindigkeit des Farbwechsels definiert werden. Durchlaufzeit eines ganzen Farbwechsels: Zwischen 4 Sekunden und 70 Sekunden.

2 Farbton wählen

Die IR-Fernbedienung der RGB-LED Ambientebeleuchtung verfügt über 16 Tasten zur direkten Farbwahl.

3 Einschalten/Ausschalten

Die RGB-LED Ambientebeleuchtung wird über die Tasten „ON“ und „OFF“ ein und ausgeschaltet.


4 Programm wählen

Sie können aus 4 vordefinierten Farbwechselprogrammen wählen. Für Wellness- und Kosmetikbehandlung ist das Programm „FADE“ besonders geeignet.



Hinweis

Um eine optimale Steuerung der RGB-LED Ambientebeleuchtung zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass beim Bedienen der IR-Fernbedienung diese in Richtung des transparenten Sensors unter dem Kopfteil gerichtet ist.

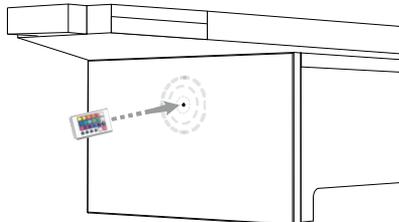

Polster

Die RUCK SPA-Behandlungsliege ist mit einem Hightech-Schaumstoff ausgestattet, der sich während der Behandlung ergonomisch an den Körper anpasst. Der temperaturempfindliche Schaumstoff hat offene Zellen, die individuell auf Körperwärme reagieren und sich dann sehr genau den Formen Ihres Körpers anpassen. Dadurch stützt dieser anatomisch exakt, nimmt den Druck vom Körper, vermeidet Druckschmerzen und sorgt für eine bessere Durchblutung. Bezogen ist der Schaumstoff mit einem Kunstleder, das besonders dehnfähig, abriebfest und desinfektionsmittelbeständig ist.



Kopfstütze

Die Kopfstütze ist ausziehbar sowie abnehmbar, indem Sie mit beiden Händen die Kopfstütze aus der Führung herausziehen.

Armauflage

Die Polster der Armauflage werden durch Magnete fixiert. In der Bauchlage können Ihre Kunden, für eine angenehme Haltung beider Arme, die Polster abnehmen. Eine Verbreiterung um ca. 5 cm auf jeder Seite erreichen Sie durch gleichmäßiges Herausziehen der Armauflage. Sie können die Armauflagen durch Herausziehen auch komplett entfernen.

Polsterheizung

Wahlweise erhalten Sie die RUCK SPA-Behandlungsliege mit einer zweistufigen Heizung. Beheizt wird die Liegefläche von dem Nasenschlitz abwärts in einer Länge von ca. 115 cm. Der Wadenbereich wird nicht beheizt. Der Schalter befindet sich unterhalb des Polsters, vom Kopfteil aus betrachtet auf der linken Seite. Nach dem Einschalten benötigt die Heizung ca. 5 Minuten für die Aufheizung. Die Liegefläche verfügt über einen eingebauten Thermo-Schalter, welcher die Temperatur konstant hält. Nach einer Einschalt-dauer von 90 Minuten schaltet die Heizung automatisch ab. Die Heizung darf nicht ohne Beaufsichtigung verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen achten Sie bitte darauf, dass nach Arbeitsende die Heizung abgeschaltet ist und der Hauptschalter auf „0“ steht.



Gefahren durch überhitzte Heizung

Bei zu heißer Liegefläche, Rauchentwicklung oder Geruchsentwicklung, ist es möglich, dass die Heizung defekt ist. Ziehen Sie dann sofort den Netzstecker.



Gefahr der Beschädigung durch scharfkantigen Objekte

Legen Sie keine scharfkantigen Objekte auf den Polstern ab. Die Heizelemente können dadurch beschädigt werden.



Gefahr der Beschädigung durch unsachgemäßen Wechsel des Polsters

Wechseln Sie nicht eigenständig den Polsterbezug!
Die Heizelemente können dadurch beschädigt werden.

Reinigung, Desinfektion und Pflege



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor dem Reinigen und/oder dem Desinfizieren:
Netzstecker ziehen!



Gefahr der Beschädigung durch falsche Pflege von Kunstledern und Oberflächen!

Desinfizieren Sie die Kontaktflächen nach jeder Behandlung mit RUCK Flächendesinfektionstücher, alkoholfrei (Art.-Nr. 2967002, 2967102 oder 2967202) Medizinprodukt.

Tipp: Verwenden Sie Einwegüberzüge, dadurch wird der direkte Hautkontakt (körpereigene Fette und Schweiß sind teils recht aggressiv) mit dem Kunstleder vermieden und dieses zusätzlich geschont.

Die Kunstlederoberflächen mit einem feuchten Tuch säubern und mit RUCK Kunstlederreinigung und -pflege (Art.-Nr. 2947001) pflegend reinigen. Bitte beachten Sie die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel gemäß der Produktkennzeichnung. Eine Minute für Bakterien, fünf Minuten für Pilze. Weitere Angaben am Desinfektionsmittel.

Keine konzentrierten Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel oder alkoholhaltige Flüssigkeiten (> 50 % Alkoholanteil) verwenden. Keine Sprühdesinfektion verwenden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die verwendeten Reinigungsutensilien sauber sind. Wenn mineralische Verschmutzungen wie Sand- und Staubkörner in den Putzmitteln eingelagert sind, kann dies zur Zerstörung der Oberfläche führen. Keine Scheuermittel verwenden, wie z. B. Scheuermilch, Reinigungsschwämme, o.ä., die abrasive Partikel enthalten können. Rückstände von ausgelaufenen Flüssigkeiten müssen unverzüglich mit einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernt werden.

Für eine schonende Reinigung der Oberflächen verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder das RUCK Mikrofaser Tuch oberflächenschonend (Art.-Nr. 29616), das auch für Holzoberflächen geeignet ist.

Vorsicht: Andere Reinigungstücher mit Kunstfasern können eine scheuernde Wirkung haben und daher die Oberfläche angreifen.

Mit der Zeit können kleine Gebrauchsspuren an den Oberflächen entstehen. Diese fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Sie stellen keine Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern sind wie bei allen Oberflächen langfristig durch den Verschleiß im Praxisalltag nicht zu vermeiden. Flecken oder Verunreinigungen, verursacht durch Flüssigkeiten, welche die Oberfläche angreifen können (wie z. B. Propolis, Teebaumöl, chlorhaltige Reiniger, o.ä.), sind grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen.



Gefahr der Krankheitsübertragung!

Unzureichende Desinfektion kann zur Übertragung von Krankheiten führen. Unbedingt die Anforderungen des nationalen zuständigen Gremiums für Hygiene und Desinfektion beachten. Das Produkt regelmäßig desinfizieren (siehe Hinweise zur Desinfektion und Pflege).



Polsterverfärbung durch Kleidungsstücke

Kleidung, wie z.B. Jeans, können zu Verfärbungen von Polsteroberflächen führen. Wenn möglich, sollten Sie versuchen, die Farbrückstände mittels einem weichem Tuch und dem RUCK® Kunstlederreinigung und -pflege, 500 ml (Art.-Nr. 2947001) zu entfernen. Generell empfiehlt es sich, wo immer möglich, Einmalschutzüberzüge zu verwenden. Nach Reinigung und Desinfektion müssen die Oberflächen vor der nächsten Behandlung gut ablüften können, d.h. Flächendesinfektion gemäß der Herstellerangaben vollständig trocknen lassen, jedoch nicht trockenwischen.



Mechanische Reinigung oder Reinigung mit Wasser oder Wasserstrahl ist nicht zulässig!

Technische Daten

Einstiegshöhe.....	58 cm
Höchste Liegeposition	87 cm
Breite	80 cm
Gesamtlänge.....	214 cm
Gesamtgewicht.....	100 kg
Anschlussdaten.....	220-240V - 50 Hz, 550 W
Schutzart	IP 20
Einschaltdauer	10% (= 2 min. EIN / 18 min. AUS)
Maximale Belastung	200 kg
Farbe Polster.....	1-farbig
Gewährleistung	2 Jahre



Elektromagnetische Beeinflussung

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch Verwendung zusätzlicher elektrischer Geräte elektromagnetische Interferenzen/Beeinflussungen auftreten können.

Wartung

Die RUCK® SPA-Behandlungsliege ist mit wartungsfreien Polyamidlagern ausgestattet und benötigt keinerlei Schmierung. Wir bitten Sie im Abstand von 2 Jahren mit unserer Serviceabteilung in Kontakt zu treten um sich hinsichtlich möglicher Wartungs- und Pflegemaßnahmen abzustimmen.



Hinweis

Instandsetzungen und Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden.

Bei Nichtbeachten bzw. Nichterfüllung aller aufgeführten Punkte erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch sowohl für Sach-, als auch Personenschäden. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bitte kontaktieren Sie unser Serviceteam.

Entsorgung



Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt.

Die RUCK® SPA-Behandlungsliege ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammel-systemen zuzuführen!



Gewährleistung

Sie erhalten für das Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Normaler Verschleiß bei Oberflächen, Polstern, Abdeckungen und sonstigen beweglichen Bauteilen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Gebrauchsspuren, alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die auf einem, der Leistungswerte und der Eigenart der Behandlungsliege entsprechenden normalen Gebrauch beruhen, sind vertragsgemäß und keine Mängel im Rechtssinn.

Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum, an dem der Erstkunde das Produkt erworben hat. Das Kaufdatum ist mit Kaufbeleg nachzuweisen. Im Rahmen der Gewährleistung wird die HELLMUT RUCK GmbH fehlerhafte Produkte kostenlos reparieren oder - nach Wahl von RUCK - ersetzen. Voraussetzung ist die frachtfreie Zusendung des fehlerhaften Produkts zusammen mit dem Kaufbeleg. Für Reklamationen im Ausland sind die dortigen Vertretungen zuständig. Im Zweifelsfalle bitte vor Rücksendung Rücksprache mit RUCK.

Die Gewährleistung entfällt, sofern nach unserer Feststellung der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Installation oder Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, äußere Einwirkung, oder als Folge nichtautorisierter Reparatur oder Veränderung entstanden ist Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des Produkts. Eine weitere Haftung (insb. Umsatz- oder Verdienstausfall) wird ausgeschlossen. Stellt sich jedoch heraus, dass es sich um einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler handelt, oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten für Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.


Änderungen und Abweichungen von der technischen Ausführung bleiben vorbehalten.

FAQ

Neuen Handschalter (Funk) synchronisieren

Jeder Handschalter (Funk) ist einer Behandlungsliege zugeordnet, d.h. auch bei mehreren Liegen in einem Raum können diese störungsfrei nebeneinander angesteuert werden. Um einen neuen Handschalter (Funk) mit einer SPA-Behandlungsliege zu verbinden muss dieser einmalig zugewiesen werden. Bitte befolgen Sie dazu folgende Schritte:

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Behandlungsliege.
2. Warten Sie jetzt ca. 30 Sekunden, damit sich die Elektro-Komponenten entladen können.
3. Halten Sie beide Tasten des Höhenhubmotors wie abgebildet, gleichzeitig gedrückt und stecken Sie den Netzstecker der Behandlungsliege wieder ein.
4. Als Bestätigung, dass sich der Handschalter (Funk) und die Behandlungsliege erfolgreich gefunden haben ertönt ein kurzer Signalton. Die Behandlungsliege lässt sich jetzt mit dem neuen Handschalter (Funk) steuern.

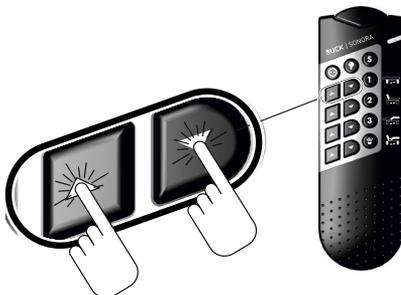

Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.: 4858401 Handschalter Funk

Art.-Nr.: 4858501 LED-Handschalter RGB-Controller

Art.-Nr.: 3215401 Frotteebezug für Kopfstütze WKL Sonora

Art.-Nr.: 3215501 Frotteebezug für Kosmetik- und Wellnessliege

Weitere Ersatzteile erfragen Sie bitte beim RUCK SERVICE.



4 255621 508343



HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23

DE-75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082. 944 20

fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de

web hellmut-ruck.de

RUCK®