



PODOLOGSTELLA² | PFLEGE UND WARTUNG

SERVICEANWEISUNG

Folgende Anleitungen werden benötigt:

Pflege und Wartung **PODOLOGSTELLA²**

Folgende Produkte werden benötigt:


RUCK Wartungsfluid 200 ml, Art.-Nr.: 10353

Wie oft muss die "Schmierung" erfolgen?

Führungsrohr und Kopfteil alle 3-6 Monate, je nach Beanspruchung.
Bowdenzug und Rückenteilmotor ca. alle 12 Monate.



BEINAUFLAGE KOMPLETT AUSZIEHEN.

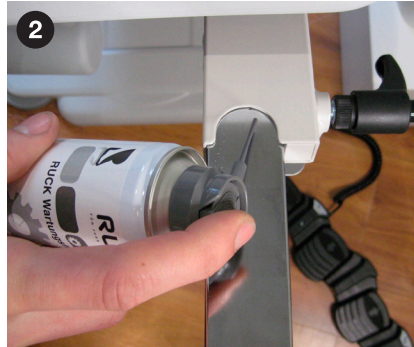

GROBZÜGIG DAS KOMPLETTE CHROMROHR EINSPRÜHEN.



FÜHRUNGSRÖHR SOWEIT WIE MÖGLICH VON INNEN EINSPRÜHEN.




GEWINDE FÜR KLEMMHEBEL SCHMIEREN.



KLEMMHEBEL (GEWINDE) SCHMIEREN.



GEWINDE DER FESTSTELLSCHRAUBE AM KOPFTEIL SCHMIEREN.

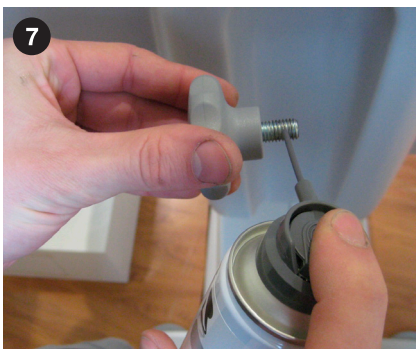

FESTSTELLSCHRAUBE SCHMIEREN.



FÜHRUNG VOM KOPFTEIL MIT EINSPRÜHEN.



GASDRUCKFEDER UNTERHALB DER BEINAUFLAGE SCHMIEREN.



10 GASDRUCKFEDER AN DER RÜCKSEITE DER BEHANDLUNGSLIEGE SCHMIEREN.




11 RÜCKENTEILEMOTOR SCHMIEREN. DAZU DIE LIEGE GANZ NACH OBEN UND IN LEICHTE RÜCKENLAGE FAHREN.



12 SCHERENGESTÄNGE SCHMIEREN. DAZU DIE LIEGE GANZ NACH OBEN UND IN LEICHTE RÜCKENLAGE FAHREN.

VORSICHT QUETSCHGEFAHR !!!

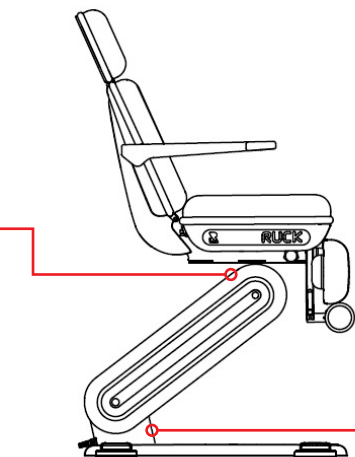

13 LIEGE AUF MAX. HÖHE BRINGEN. MOTORBOLZEN OBEN UND UNTEN WIE AUF BILD (13) UND (14) GEZEIGT MIT SCHMIERMittel BESPRÜHEN.