




RUCK

FÜR FUSS UND PFLEGE



DAS KORREKTE AUSZIEHEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN

1 HANDSCHUHINNENFLÄCHE GREIFEN UND ANHEBEN

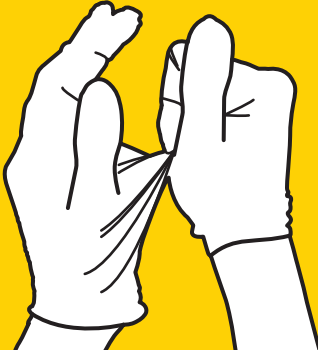

2 HANDSCHUH GANZ ABZIEHEN, ZUSAMMENKNÜLLEN UND FESTHALTEN



3 MIT DEM DAUMEN UNTER DEN HANDSCHUH GREIFEN UND ABZIEHEN



4 HANDSCHUH ÜBER HANDSCHUH STÜLPEN UND KOMPLETT ENTSORGEN

