

**NUCK**<sup>®</sup> | **MOBILSYSTEM**  
PERSONAL FOOTCARE

## **DIE TECHNIKEINHEIT**

für **PODOLOG NOVA 3**, **PODOLOG ECO** und **PODOLOG ONE**



## INHALTSVERZEICHNIS

## SEITE

PRODUKTBESCHREIBUNG	4
LIEFERUMFANG	5
FUSSPFLEGEGERÄT IN TECHNIKEINHEIT EINSETZEN	6
LUPENLEUCHE UND HANDSTÜCKHALTER MONTIEREN	12
TECHNIKEINHEIT REINIGEN UND DESINFIZIEREN	13
GEWÄHRLEISTUNG	16



Ganz einfach gepackt,  
VIDEO auf [www.hellmut-ruck.de/special/mobilsystem](http://www.hellmut-ruck.de/special/mobilsystem)



## Liebe Kundinnen und Kunden,

die RUCK MOBIL SYSTEM Technikeinheit ist die praktische Tasche für alle technischen Produkte für die professionelle mobile Fußpflege. Der zeitlos medizinische Look der Außenhülle ist geprägt durch eine robuste, wasserabweisende LKW-Plane. Der Einsatz mit integrierten und drehbaren Arbeitstabletts aus stoßfestem ABS-Kunststoff ist hygienisch einfach zu reinigen. Auspacken – anschließen – fertig! Konzentration auf das Wesentliche und Verzicht auf unnötigen Stauraum bringen bei der Technikeinheit einen enormen Gewichtsvorteil. Dank kompakter Maße findet sich an jedem Einsatzort ein sicherer Platz zum Abstellen.

Die System Technikeinheit hat Platz für alle PODOLOG Fußpflegegeräte, die professionelle Lupenleuchte PODOLOG CIRCLE S mobil, das Officemappen-Set und ein 3 Meter Verlängerungskabel.

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Für Rückfragen stehen wir Ihnen auch hier gerne zur Verfügung.

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns hiermit herzlich und wünschen Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit viel Freude mit Ihrer neuen Technikeinheit.

Ihre HELLMUT RUCK GmbH

**HIER STECKT DIE  
GANZE TECHNIK DRIN**



Die Technikeinheit

**ALLES DABEI  
FÜR ALLE FÄLLE**



Die Arbeitseinheit

**FÜR NACHSCHUB  
IST IMMER GESORGT**



Die Nachschubeinheit



## PRODUKTBESCHREIBUNG UND LIEFERUMFANG

- 01      PODOLOG CIRCLE S MOBIL (optional)
- 1.1     GELENKKAPPE
- 02      DREHBARE INSTRUMENTENTABLETTS
- 03      SCHWENKBARER HANDSTÜCKHALTER
- 04      HANDSTÜCKABLAGE
- 05      TECHNIKHAUBE
- 06      GRUNDPLATTE
  
- 07      FIXIERUNG DER DREHBAREN INSTRUMENTENTABLETTS
- 08      MEHRFACHSTECKDOSE MIT O-RING FIXIERT
- 09      KABELFIXIERUNG
- 10      FÜHRUNGSNUT FÜR TECHNIKHAUBE
- 11      LEUCHTENHALTER MIT MADENSCHRAUBE
- 12      O-RING (1 x für Steckernetzeil der PODOLOG CIRCLE S, 1 x Ersatz)
- 13      SILIKONGRIFF-EINSATZ
- 14      INBUSSCHLÜSSEL FÜR LEUCHTENHALTER
- 15      4 x SILIKONFIXIERER (Ersatz)
- 16      FIXIERGURT FÜR FUSSPFLEGEGERÄT
- 17      SILIKONFIXIERER FÜR TECHNIKHAUBE
  
- 18      TECHNIKTASCHE

## FUSSPFLEGEGERÄT IN TECHNIKEINHEIT EINSETZEN



1. SILIKONFIXIERER LÖSEN.



2. SILIKONFIXIERER LÖSEN.



3. SILIKONFIXIERER LÖSEN.



4. TECHNIKHAUBE ABNEHMEN.



5. GRUNDPLATTE MIT VIER AUSSPARUNGEN FÜR DIE GERÄTEFÜSSE.



6. FUSSPFLEGEGERÄT DIREKT IN DIE VIER AUSSPARUNGEN FÜR DIE GERÄTEFÜSSE SETZEN.



7. FUSSPFLEGEGERÄT SITZT SATT IN SEINER POSITION.



8. FUSSPFLEGEGERÄT MIT FIXIERGURT AUF DER GRUNDPLATTE SICHERN. WENN NOTIG, FIXIERGURT NOCHMALS ÖFFNEN UND VERKÜRZEN.



9. NETZKABEL DES FUSSPFLEGEGERÄTS IN MEHRFACHSTECKDOSE EINSTECKEN.



10. NETZKABEL LINKS NEBEN DEM FUSSPFLEGEGERÄT VERSTAUEN.



11. SCHWARZE KABELDURCHFÜHRUNG IN VORDERE AUSSPARUNG DER TECHNIKHAUBE EINSETZEN.



12. SILIKONFIXIERER INEINANDER VERSCHRÄNKEN.




13. TECHNIKHAUBE IN UMLAUFENDE NUT DER GRUNDPLATTE EINSETZEN.



14. ABSAUGSCHLAUCH DES FUSSPFLEGEGERÄTS AUSRICHTEN.



15. HANDSTÜCK IN HANDSTÜCKABLAGER EINSETZEN.

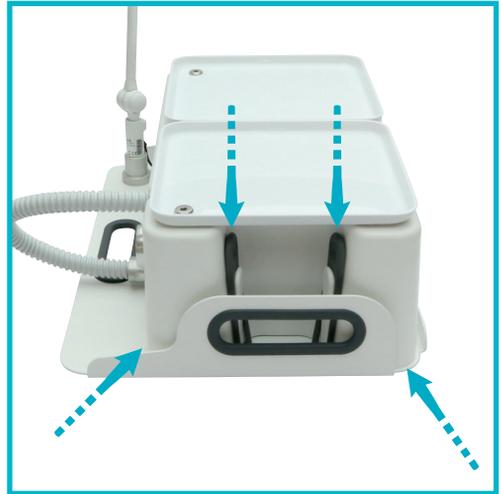

16. SILIKONFIXIERER IN TECHNIKHAUBE EINHÄNGEN. TECHNIKHAUBE IN DIE UMLAUFENDE NUT DER GRUNDPLATTE EINRASTEN.



17. SILIKONFIXIERER IN TECHNIKAUBE  
EINHÄNGEN. TECHNIKAUBE IN DIE  
UMLAUFENDE NUT DER GRUNDPLATTE  
EINRASTEN.



18. VERLÄNGERUNGSKABEL DES MEHR-  
FACHSTECKERS AUFROLLEN UND IN DEN  
DAFÜR VORGEGEHEHENEN PLATZ ABLEGEN.



19. LUPENLEUCHE AN SAUGSCHLAUCH  
VORBEIFÜHREN.

## LUPENLEUCHE UND HANDSTÜCKHALTER MONTIEREN



1. HAUBE ABNEHMEN.



2. MADENSCHRAUBE IN LEUCHTENHALTER LÖSEN.



3. HANDSTÜCKHALTER, DANN O-RING ÜBER DEN LEUCHTENFUSS AUFSETZEN.



4. MADENSCHRAUBEN DES LEUCHTENHALTERS SO ANZIEHEN, DASS SICH LEUCHE LEICHT DREHEN LÄSST.



5. ZUR FIXIERUNG DES NETZKABELS O-RING NEHMEN (WENN NÖTIG, DOPPELT NEHMEN).



6. NETZKABEL AUF STECKERNETZTEIL FIXIEREN UND IN MEHRFACHSTECKDOSE EINSETZEN.

## TECHNIKEINHEIT REINIGEN, DESINFIZIEREN UND PFLEGEN



### **GEFAHR!**

Unbedingt Netzstecker vor dem Reinigen und/oder Desinfizieren abziehen.



### **VORSICHT!**

>>> Achtung: Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht in die Mehrfachsteckdose sprühen.



### **VORSICHT!**

Alle Oberflächen nur mit einem milden Haushaltsreiniger säubern. Keine Scheuermittel oder "scharfen" Reiniger verwenden. Eine Flächendesinfektion der Technikeinheit kann mit Desinfektionsmitteln ohne Alkoholanteil durch Abwischen erfolgen. Bitte beachten Sie zusätzlich die jeweiligen Anwendungshinweise und Einwirkzeiten der Hersteller des verwendeten Desinfektionsmittels. Nach dem Reinigen bzw. Desinfizieren die Technikeinheit nicht sofort einpacken, sondern zuerst trocknen lassen, um unerwünschte Wechselwirkungen mit den Materialien zu vermeiden. Stark alkalische und/oder saure Desinfektionsmittel sowie solche mit aggressiven Inhaltsstoffen können die Technikeinheit dauerhaft beschädigen. Ebenfalls ungeeignet sind Lösungsmittel sowie diverse Scheuermittel.

Folgende Desinfektionsmittel werden von RUCK empfohlen:

RUCK Flächendesinfektion (Art.-Nr. 29402)

RUCK Schaumdesinfektion (Art.-Nr. 29408)

RUCK Desinfektionstücher alkoholfrei (Art.-Nr. 29428)

RUCK Desinfektionstücher, 80 Stück im Softpack (Art.-Nr. 2940403)



1. TECHNIKEINHEIT AUS DER TASCHE NEHMEN.



2. HAUBE ABNEHMEN.



3. ALLE KOMPONENTEN VON DER GRUNDPLATTE ABNEHMEN.



4. TECHNIKEINHEIT KANN JETZT VOLLSTÄNDIG GEREINIGT WERDEN. ZUSÄTZLICH KÖNNTEN FÜR DIE REINIGUNG DIE SILIKONGRIFF-EINSÄTZE ENTFERNT WERDEN.



5. LUPENLEUCHTENSOKKEL IN LEUCHTENHALTER REGELMÄSSIG MIT RUCK WARTUNGSFLUID FETTEN (Art.-Nr. 10353).



6. SICHERUNGSMUTTER VON SCHWENKBAREN INSTRUMENTENTABLETTS REGELMÄSSIG MIT RUCK WARTUNGSFLUID FETTEN (Art.-Nr. 10353).



7. LEUCHTENGELLENKE NACHSTELLEN. DAFÜR GELENKKAPPE ABNEHMEN UND GELENK MIT GABELSCHLÜSSEL FESTSTELLEN (IM LIEFERUMFANG DER LEUCHE ENTHALTEN).

## GEWÄHRLEISTUNG

Sie erhalten für die RUCK MOBIL SYSTEM Technikeinheit eine Gewährleistung von einem Jahr. Normaler Verschleiß bei Oberflächen, Abdeckungen und sonstigen beweglichen Bauteilen ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum, an dem der Erstkunde das Produkt erworben hat. Das Kaufdatum ist mit Kaufbeleg nachzuweisen.

Im Rahmen der Gewährleistung wird die HELLMUT RUCK GmbH eine fehlerhafte Technikeinheit kostenlos reparieren oder – nach Wahl von RUCK – ersetzen. Voraussetzung ist die frachtfreie Zusendung der fehlerhaften Technikeinheit zusammen mit dem Kaufbeleg. Für Reklamationen im Ausland sind die dortigen Vertretungen zuständig. Im Zweifelsfalle bitte vor Rücksendung Rücksprache mit RUCK halten.

Die Gewährleistung entfällt, sofern nach unserer Feststellung der Fehler durch unsachgemäße oder falsche Installation oder Handhabung, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, äußere Einwirkung oder als Folge nichtautorisierter Reparatur oder Veränderung entstanden ist.

Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch der Technikeinheit. Eine weitere Haftung (insb. Umsatz- oder Verdienstausfall) wird ausgeschlossen. Stellt sich jedoch heraus, dass es sich um einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler handelt oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten für Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

**Änderungen und Abweichungen von der technischen Ausführung bleiben vorbehalten.**









Unser Tipp:

## RUCK MOBILSYSTEM –

Das Handbuch zur  
mobilen Fußpflege

Von der Geschäftsidee bis hin zur  
hygienischen Instrumentenaufbereitung  
werden in kompetenten Beiträgen  
Fragen geklärt und neue Wege der  
Behandlung gezeigt.



# RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23

D-75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082. 944 20

fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail [kontakt@hellmut-ruck.de](mailto:kontakt@hellmut-ruck.de)

web [www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de)